




**Appareil de suivi de l'asthme**



**Instructions pour les professionnels de santé**

**Effectuer un test**

- 1 Insérer l'embout buccal et  
⌚ allumer l'appareil
- 2 Souffler 3 fois

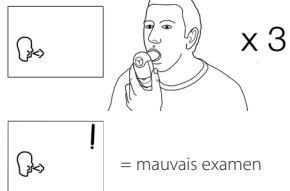

- 3 Meilleur test

DEP- +/- 5%; VEMS +/- 3%

**Configuration du DEP de référence**

- 1 ⌚ Allumer
- 2 ▼ + ▲ Maintenir appuyé 3 secondes



- 3 Appuyer sur ▲ pour augmenter le DEP



- 4 Appuyer sur ← pour valider le DEP choisi



Appuyer sur ←← pour sortir du menu

**Configuration du VEMS de référence**

- 5 Appuyer sur ▲ pour augmenter le VEMS
- 6 Appuyer sur ← pour valider votre choix



A noter: Les zones sont à présent configurées avec des limites à 80% et à 50%

**EN ISO 23747:2007**  
Précision requise: ± 10% DEP  
Résistance: < 0.35 kPa/L/  
**Vitalograph asma-1**  
Précision: ± 5% DEP  
± 3% VEMS  
Résistance: < 0.15kPa/L/s

**Visualisation des résultats enregistrés**

- 1 ⌚ Allumer
- 2 ← Maintenir appuyé 3 secondes



- 3 ▲ ou ▼ Voir les résultats enregistrés




- 4 ← Retour



**Effacer les résultats enregistrés**

- 1 ⌚ Allumer
- 2 ▼ + ← Maintenir appuyé 10 secondes

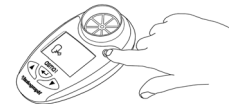

**Nettoyage et désinfection**

La coque de l'appareil doit être nettoyée chaque semaine, voir plus souvent si nécessaire.

Il est recommandé d'utiliser des lingettes désinfectantes, avec une attention particulière sur la zone d'insertion de l'embout buccal.

**Modifier la zone verte**

- 1 ⌚ Allumer
- 2 ← + ▲ Maintenir appuyé 3 secondes



- 3 ▲ ou ▼ choisir la limite supérieure



- 4 ← Valider la limite supérieure choisie



- 4 ← Valider la limite supérieure choisie



**Modifier les autres zones**

- 5 ▲ ou ▼ choisir la limite inférieure
- 6 ← Valider la limite inférieure choisie



A noter: A présent, les 3 zones sont configurées, appuyer sur ←← pour sortir du menu ou pour configurer une 4ème zone

- 7 ▲ ou ▼ choisir limite moyenne



- 8 ← Valider la limite moyenne choisie



**Configuration des zones par défaut**

- 1 ⌚ Allumer
- 2 ▼ + ▲ + ← Maintenir appuyé 10 secondes



- 3 ⌚ Eteindre

